

## Hengityssuojain Lifa Air FFP3 LMv900

### KÄYTTÖOHJE:

1. Avaa hengityssuojain puhtain käsin. Ota toisella kädellä kiinni hengityssuojaimen etuosasta, asettele päänuhasto maskin ulkopuolelle ja avaa suojaimen ylä- ja alaläpät. Taivuta nenälankaa hieman sen keskikohdasta muodostaaksesi suojaimesta kupinmuotoisen.
2. Varmista, että suojaimen ylä- ja alaläpät on täysin avautuneet. Pidä kiinni suojaimen etuosasta yhdellä kädellä, avoin puoli kohti kasvoja.
3. Pidä toisella kädellä kiinni suojaimen etuosasta ja asettele suojain kasvoille siten, että vaahtomuovipehmike tulee nenän päälle. Vedä toisella kädellä kevyesti päänuhastoa pois päin suojaimesta, ja nosta molemmat nauhat pään yli pään taakse.
4. Asettele ylempi päänuuha korkealle pääläelle, ja alempi päänuuha korvien alapuolelle.
5. Muotoile molemmin käsin nenälanka tiukasti nenäsi mukaisesti. Päänauhat eivät saa olla kierteellä.
6. Varmista että suojain istuu hyvin eikä vuoda. Tarkista vuodot peittämällä suojain molemmin käsin ja hengittämällä ulos terävästi. Mikäli ilmaa virtaa nenän tai sivujen kautta, korjaa nenälangan ja/tai päänuhaston asentoa kunnes suojain on tiivis.
7. Poista suojain koskemalla ainoastaan kiinnityslenkkejä. Hävitä suojain sekajätteeseen. Pese kädet.